

Dispomedic mask

Mascarilla quirúrgica desechable IIR

Con cintas, 3 capas.

CARACTERÍSTICAS

Mascarilla quirúrgica rectangular, de 3 capas, con capa interior con filtro antibacteriano, de tejido sin tejer que no desprende partículas, transpirable. Con pliegues para un mejor ajuste anatómico.

Tipo IIR, no estéril. Medidas: 175 x 95 mm (±5 mm)

Presenta tira de ajuste nasal interna de material moldeable adaptable y resistente de 9,5 cm aprox.

Capa interna de confort, que no irrita la piel

Cintas de sujeción.

Eficacia filtración bacteriana ≥98%

Resistencia a la respiración ≤60,0 Pa/cm²

Resistencia a salpicaduras ≥ 16 kpa

Limpieza microbiana ≤ 30 ufc/g


Envasada en caja dispensadora.

Libre de látex

Cumplimiento de la norma UNE-EN 14683:2019+AC



MODO DE EMPLEO

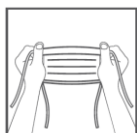

1. Colocar la mascarilla con la parte de color hacia afuera y la pinza nasal hacia arriba.



2. Agarrar por los extremos superiores y ajustar las cintas a la medida de la cabeza.



3. Tirar de las cintas inferiores y ajuste por el cuello.



4. Presionar la pinza nasal para que quede lo más ajustada posible, asegurarse de que cubre completamente nariz y boca.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.
 No utilizar el producto sobre piel lesionada.
 No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.
 Caducidad: 3 años.

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)*
9000101	2000 unidades (50 uds/caja dispensadora 40 cajas dispensadoras/ caja)	Caja dispensadora 18.5x10x8 Caja 52x39x34	8.7

TOLERANCIA DE PESO ±10%

CUMPLE CON:

- Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo al Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- UNE-EN 14683:2019+AC:2019 Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo.
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante e importador Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

