



DISPOSITIVOS MÉDICOS

DENTASEPT®

Spray 60 PRO

INDICACIONES

Desinfección rápida de dispositivos médicos no sumergibles y no invasivo. El uso de Dentasept® Spray 60 PRO después de cada paciente evita el riesgo de infección cruzada.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- ✓ Solución lista para usar
- ✓ A base de etanol
- ✓ Seca rápidamente sin dejar marcas
- ✓ Eficaz en solo 30 segundos sobre todos los virus con envoltura¹
- ✓ Amplio espectro de actividad
- ✓ Perfume de limón
- ✓ Dispositivo médico de clase IIa (Directiva 93/42/CEE modificada)

¹ El Instituto Robert Koch recomienda el uso de desinfectantes que proclamen una actividad virucida limitada para interrumpir la cadena de infección. Según este Instituto, una actividad virucida limitada (eficaz contra los virus con envoltura) corresponde a una actividad contra el virus vaccinia y el BVDV.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS A 20°C

Bactericida: EN 1040, EN 13727, EN 13697 - 30 segundos.

SARM: EN 13697 - 30 segundos.

Tuberculocida: EN 14348, EN 14563 - 30 segundos.

Micobactericida: EN 14348, EN 14563 - 5 minutos.

Levuricida: EN 1275, EN 13624, EN 13697 - 30 segundos.

Fungicida: EN 1275, EN 13624, EN 13697 - 5 minutos.

Activo sobre BVDV (virus modelo HCV), rotavirus, herpesvirus, coronavirus, adenovirus, PRV (virus modelo HBV), VIH-1, virus vaccinia - 30 segundos.

Activo sobre calicivirus felino - 5 minutos.

COMPOSICIÓN

Etanol, propionato de N,N-didecil-N-metil-poli(oxietil)amonio, excipientes.

ACONDICIONAMIENTO

Envase pulverizador de 1 litro.

Garrafa de 5 litros.



DISPOSITIVOS MÉDICOS

DENTASEPT® Spray 60 PRO

PROTOCOLO DE USO


Desinfección rápida de dispositivos médicos no sumergibles y no invasivo. El uso de Dentasept® Spray 60 PRO después de cada paciente evita el riesgo de infección cruzada.

ANTES DE UTILIZAR

Ponerse guantes apropiados.

MODO DE USO

- 1** ATENCIÓN: antes de utilizar, verificar que la zona a tratar esté limpia y sea compatible con el alcohol.
- 2** Pulverizar uniformemente y en cantidad suficiente sobre la zona a tratar (+/- 30 ml/m², es decir, 10 pulverizaciones, aproximadamente).
- 3** Dejar actuar Dentasept® Spray 60 PRO asegurándose de que la zona permanezca húmeda durante el tiempo de contacto recomendado. Aplicar una segunda vez, si es necesario.
- 4** No necesita enjuague, salvo si el dispositivo médico entra en contacto con la piel o las mucosas.

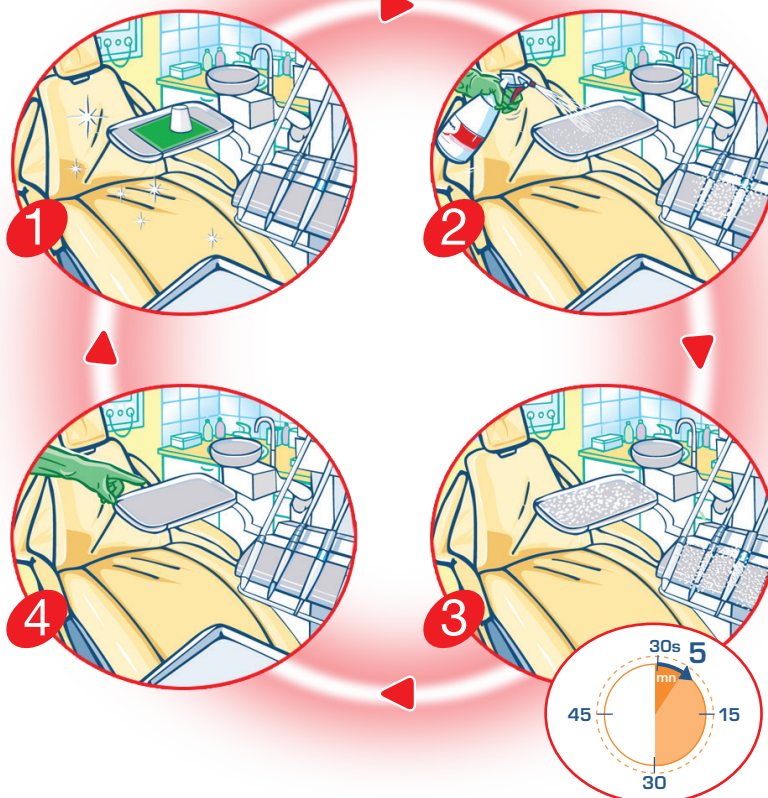

PRECAUCIONES

Peligroso – respetar las precauciones de uso.
Dispositivo médico de clase IIa, CE 0459. Antes de utilizarlo, leer la etiqueta y las informaciones relativas al producto.

Conservar entre +5°C y +25°C.