

	TÍTULO: LACLEDIN SUPERFICIES SPRAY 700 ML	CÓDIGO: FT-SGC077.01
	FECHA DE EMISIÓN: 27/MAY/2021	REEMPLAZA: N/A
		No. PÁG.: 1 de 3

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:	Revisado/Aprobado por:
Firma/fecha	Firma/fecha

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**
Los documentos impresos o descargados deben ser verificados frente a la versión vigente.

1. CARACTERÍSTICAS

- Solución hidroalcohólica para el uso a base de digluconato de chorhexidina y sal de amonio cuaternario, con un amplio espectro de acción para la desinfección rápida y eficaz de la superficie de productos sanitarios no invasivos, superficies extendidas o de difícil acceso de equipos biomédicos. No requiere dilución y garantiza una protección rápida y prolongada. Lacleidin actúa en 5 minutos contra las bacterias gram positivas y gram negativas, virus incluyendo VIH, VHB y VHC y en 60 minutos contra micobacterias incluyendo la causante de la tuberculosis.
- Espectro de acción:
 - Bacterias Gram positivas y Gram negativas
 - Micobacterias
 - Hongos
 - VIH
 - Hepatitis B (VHB)
 - Hepatitis C (VHC)
 - Actuación en presencia de material orgánico (sangre, saliva, exudados orgánicos...)
- Estándares testados: EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 14561, EN 14562.
- Composición: Digluconato de clorhexidina, Cloruro de benzalconio, etanol, alcohol isopropílico.

2. FINALIDAD

Indicado para la desinfección de la superficie de productos sanitarios no invasivos, especialmente formulado para ambientes médicos y dentales.

3. CLASIFICACIÓN

Producto Sanitario Clase IIA.

4. PRESENTACIÓN

Spray 700 mL

5. NÚMERO DE REFERENCIA

Ref: 07-018: LACLEDIN desinfectante de superficies spray 700ml.

6. MODO DE EMPLEO

- Agitar bien antes de usar y pulverizar directamente sobre la superficie a tratar.
- Rocíe las superficies y objetos a desinfectar a una distancia de 30 cm hasta que estén completamente humedecidos.
- Dejar el producto actuar y finalmente secar con un paño o papel desechable.

7. ADVERTENCIAS

- Una vez abierto el envase, si se almacena correctamente el producto, conservar la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
- No utilizar sobre superficies sensibles al alcohol.
- Sólo para uso profesional.
- Puede provocar una reacción alérgica.
- Provoca irritación ocular grave.
- Puede provocar somnolencia o mareos.
- Nocivo para organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Mantener alejado del calor, fuego, chispas y superficies calientes.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No fumar.
- Almacenar en un lugar bien ventilado.
- Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- Mantener en un lugar fresco.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- Aclarar la piel, en caso de contacto con la piel.
- Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos, en caso de contacto con los ojos.
- Utilizar espuma resistente al alcohol o dióxido de carbono para la extinción.

8. IMAGEN

